

PRZED WYKONANIEM BADANIA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Pink DUO

2 Testy Ciążowe płytkowy + strumieniowy

2
testy

Wyrób medyczny do samokontroli

WSTĘP

Pink DUO 2 Testy Ciążowe płytkowy + strumieniowy to szybkie i wysoce czułe testy ciążowe służące do wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) - hormonu, który występuje w moczu kobiet w ciąży. Zasada działania testów ciążowych oparta jest na reakcji hormonu hCG znajdującego się w moczu kobiety w ciąży z monoklonalnymi przeciwciałami anti-hCG, które zostały naniesione na testy. Czułość testu Pink Super Czuły Test Ciążowy strumieniowy została ustawiona na 10 mIU/ml, natomiast czułość testu Pink Test Ciążowy płytkowy na 20 mIU/ml.

SKŁAD OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia 2 badań:

- » 1 foliową szczelnie zamkniętą kopertkę, w której znajdują się: 1 test Pink Super Czuły Test Ciążowy strumieniowy oraz 1 środek pochłaniający wilgoć
- » 1 foliową szczelnie zamkniętą kopertkę, w której znajdują się: 1 Pink Test Ciążowy płytkowy, 1 plastikowa pipetka oraz 1 środek pochłaniający wilgoć
- » 1 instrukcję wykonania testu

Przed wykonaniem badania należy przygotować zegarek, który będzie potrzebny do odmierzenia czasu odczytu wyniku testu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI




- » Testy służą wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- » Testy należy przechowywać w temperaturze 2-30°C. Nie zamrażać.
- » Test przechowywany w lodówce należy przed wykonaniem badania pozostawić przez pół godziny w temperaturze pokojowej.
- » Nie używać testu po dacie ważności umieszczonej na opakowaniu.
- » Nie używać testu w przypadku, gdy kopertka foliowa jest uszkodzona, ponieważ wilgoć z powietrza mogła uszkodzić test.
- » Testy są przeznaczone tylko do jednokrotnego użycia.
- » Zużyty test usuwać jak każdy inny odpad domowy.
- » Testy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- » Po wykonaniu testu ciążowego nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

KROK I Pink Super Czuły Test Ciążowy strumieniowy

WYKONANIE TESTU (Wykonaj jeśli podejrzewasz, że jesteś w ciąży)


Do badania najlepiej nadaje się mocz poranny, ponieważ zawiera on najwięcej hormonu hCG.

- » Tuż przed wykonaniem badania otwórz foliową kopertkę przez jej rozdarcie. Z kopertki wyjmij test strumieniowy i zapoznaj się z jego budową. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić do domowych śmieci.

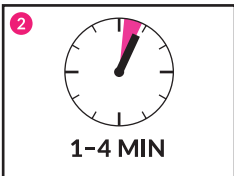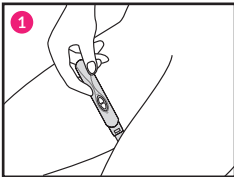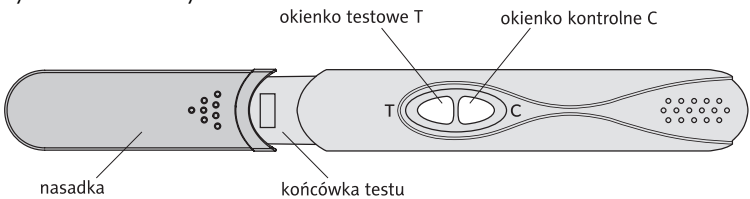


- » Zdejmij nasadkę i skieruj końcówkę testu pod strumień moczu na co najmniej 10 sekund **1**. Można również zebrać mocz do suchego i czystego naczynia i zanurzyć w nim na co najmniej 10 sekund samą końcówkę testu.
- » Po wyjęciu końcówki testu z badanego moczu, nałóż z powrotem nasadkę i umieść test na poziomej powierzchni tak, aby widoczne były obydwa okienka testu.
- » Obserwuj przemieszczanie się badanej próbki moczu przez strefę testową T i kontrolną C testu. Odczekaj, aż w okienkach pojawią się barwne prążki.
- » Wynik testu odczytaj po czasie 1 do 4 minut od momentu zanurzenia końcówki testu w moczu **2**. Jeśli nie pojawi się żadna barwna linia, odczekaj jeszcze 1 minutę.
- » **Nie bierz pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut.**


INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU

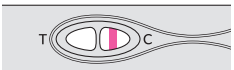

Wynik ujemny (brak ciąży)
Pojawia się prążek kontrolny C, prążek testowy T nie pojawia się. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie nie jesteś w ciąży.

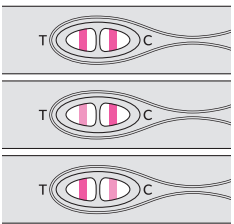

Wynik dodatni (ciąża)
Pojawiają się dwa wyraźne prążki: w strefie testowej T i kontrolnej C. Intensywność barwy prążka T nie ma znaczenia, może być taka sama, słabsza lub silniejsza niż intensywność barwy prążka C. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie jesteś w ciąży.

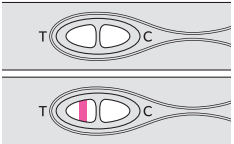


Wynik nieważny
W przypadku, gdy nie pojawia się żaden prążek lub pojawia się tylko prążek testowy T, wynik testu jest nieważny i należy powtórzyć badanie używając nowego testu ciążowego, ściśle przestrzegając instrukcji używania.


KROK II Pink Test Ciążowy płytkowy

WYKONANIE TESTU (Wykonaj po terminie spodziewanej miesiączki)

Badanie wykonuje się ze świeżo pobranego moczu. Do badania najlepiej nadaje się mocz poranny, ponieważ zawiera on najwięcej hormonu hCG. Badany mocz należy pobrać do czystego i suchego naczynia.


- » Tuż przed wykonaniem badania otwórz foliową kopertkę przez jej rozdarcie. Z kopertki wyjmij test płytkowy i plastikową pipetkę. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić do domowych śmieci.
- » Płytkę testową umieść na poziomej powierzchni.

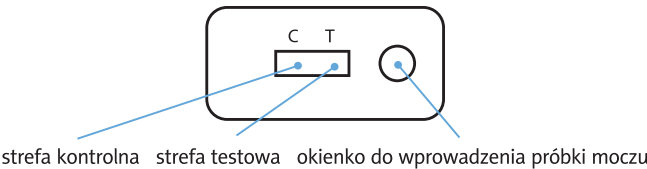

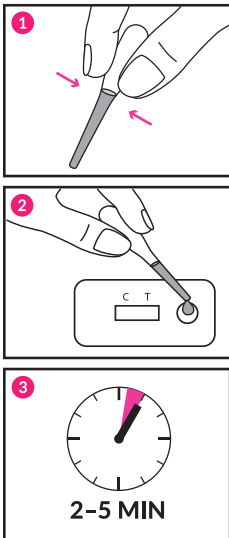


- » Końcówkę plastikowej pipetki zanurz w badanym moczu. Ściskając górną część pipetki, napełnij ją moczem ❶.
 - » Odmierz powoli 3 pełne krople moczu do okrągłego okienka na płytce testowej ❷.
- Aby zapewnić poprawne wykonanie testu, pipetkę trzymaj pionowo, ok. 1 cm nad powierzchnią płytki testowej tak, aby utworzyły się duże, swobodnie spadające krople, bez pęcherzyków powietrza.
- » Obserwuj przemieszczanie się badanej próbki moczu w bibule przez strefę testową T i kontrolną C testu.
 - » Odczekaj, aż w okienku wynikowym pojawią się barwne prążki. Wynik testu odczytaj po czasie 2 do 5 minut od momentu wprowadzenia moczu do okrągłego okienka na płytce testowej ❸.
 - » Jeśli nie pojawi się żadna barwna linia, odczekaj jeszcze 1 minutę. **Nie bierz pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut.**




INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU

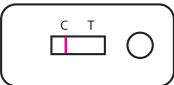

Wynik ujemny (brak ciąży)
Pojawia się prążek kontrolny C, prążek testowy T nie pojawia się. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie nie jesteś w ciąży.

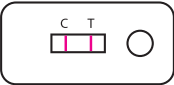

Wynik dodatni (ciąża)
Pojawiają się dwa wyraźne prążki: w strefie testowej T i kontrolnej C. Intensywność barwy prążka T nie ma znaczenia, może być taka sama, słabsza lub silniejsza niż intensywność barwy prążka C. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie jesteś w ciąży.

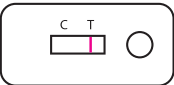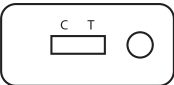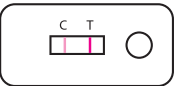

Wynik nieważny
W przypadku, gdy nie pojawia się żaden prążek lub pojawia się tylko prążek testowy T, wynik testu jest nieważny i należy powtórzyć badanie używając nowego testu ciążowego i ściśle przestrzegając instrukcji używania wyrobu.

INTERPRETACJA WYNIKÓW PO WYKONANIU DWÓCH TESTÓW

- » Jeśli po wykonaniu dwóch testów (strumieniowego oraz płytkowego) uzyskasz dwa wyniki dodatnie, najprawdopodobniej jesteś w ciąży
- » Jeśli po wykonaniu dwóch testów (strumieniowego oraz płytkowego) uzyskasz dwa wyniki ujemne, najprawdopodobniej nie jesteś w ciąży
- » Jeśli po wykonaniu dwóch testów (strumieniowego oraz płytkowego) uzyskasz dwa różne wyniki (jeden wynik dodatni oraz jeden wynik ujemny) oznacza to wynik niejednoznaczny, skonsultuj się z lekarzem.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA

Na czym polega działanie testu ciążowego?
Test ciążowy wykrywa w moczu hormon hCG (ludzką gonadotropinę kosmówkową). Hormon ten organizm kobiety zaczyna wytwarzać, jeśli jest ona w ciąży. W miarę rozwoju ciąży ilość hormonu hCG w moczu wzrasta.

Kiedy powinnam wykonać badanie testem ciążowym, jeśli spodziewam się, że jestem w ciąży?
Badanie testem ciążowym Pink Super Czuły Test Ciążowy strumieniowy możesz wykonać już po 6 dniach od momentu spodziewanego zapłodnienia. Jednak najlepiej wykonać je pierwszego dnia po terminie spodziewanej miesiączki.
Badanie testem Pink Test Ciążowy płytkowy najlepiej jest wykonać pierwszego dnia po terminie spodziewanej miesiączki.

Czy muszę wykonywać badanie z moczu porannego?
Jeśli nie minął pierwszy dzień spodziewanej miesiączki, badanie testem Pink Super Czuły Test Ciążowy strumieniowy i Pink Test Ciążowy płytkowy najlepiej jest wykonać z moczu porannego, ponieważ zawiera on najwyższej hormonu hCG.
Po pierwszym dniu spodziewanej miesiączki, badanie testem Pink Super Czuły Test Ciążowy strumieniowy i Pink Test Ciążowy płytkowy możesz wykonać o dowolnej porze dnia.

Jak dokładne są Pink DUO 2 testy ciążowe płytkowy + strumieniowy?
Z przeprowadzonych badań klinicznych wynika, że testami Pink DUO uzyskuje się wyniki dokładne w ponad 99%.

Jak czułe są Pink DUO 2 testy ciążowe płytkowy + strumieniowy?
Pink Super Czuły Test Ciążowy strumieniowy wykrywa hormon hCG o stężeniu równym lub wyższym niż 10 mIU/ml, natomiast Pink Test Ciążowy płytkowy o stężeniu równym lub wyższym niż 20 mIU/ml.
Pink DUO 2 Testy Ciążowe płytkowy + strumieniowy zostały wystandaryzowane wobec WHO International Standard. Przeprowadzone badania wykazały, że na wyniki testów Pink Super Czuły Test Ciążowy strumieniowy i Pink Test Ciążowy płytkowy nie mają wpływu hormony LH (do ilości 300 mIU/ml), FSH (do ilości 1000 mIU/ml) i TSH (do ilości 1000 µIU/ml).

Skąd wiem, że test działa prawidłowo?
Pojawienie się barwnego prążka w strefie kontrolnej C świadczy o tym, że test, który stosowałaś, działa prawidłowo. Obecność prążka kontrolnego C świadczy również o tym, że badanie zostało wykonane prawidłowo.

Jakie czynniki mogą wpływać na wynik testu ciążowego?
Przyjmowanie leków zawierających hormon hCG (takich jak: Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL) może prowadzić do otrzymania wyników fałszywie dodatnich. Alkohol, doustne środki antykoncepcyjne, środki przeciwbólowe, antybiotyki lub leki hormonalne niezawierające hCG nie powinny wpływać na wynik.
W przypadku niektórych schorzeń, np. torbieli jajnika, ciąży pozamacicznej mogą występować podwyższone poziomy hCG, co może prowadzić do uzyskania wyniku fałszywie dodatniego. Samoistne poronienia mogą również wpływać na wyniki testu ciążowego.
U kobiet w okresie menopauzy Pink Super Czuły test ciążowy strumieniowy może wskazać wyniki fałszywie dodatnie.

Co powinnam zrobić, jeśli wynik testu ciążowego wskazuje na to, że nie jestem w ciąży?
Jeśli uzyskasz ujemny wynik testu ciążowego, to znaczy, że w moczu nie został wykryty hormon hCG i prawdopodobnie nie jesteś w ciąży. Jeśli w ciągu tygodnia miesiączka nie pojawi się, wykonaj badanie drugim testem ciążowym. Jeśli ponownie uzyskasz wynik ujemny, a miesiączka nie pojawi się, udaj się do lekarza po poradę.

Co powinnam zrobić, jeśli wynik testu ciążowego wskazuje na to, że jestem w ciąży?
Dodatni wynik testu ciążowego świadczy o tym, że w moczu występuje hormon hCG i prawdopodobnie jesteś w ciąży. Możesz wykonać drugi test ciążowy po terminie spodziewanej miesiączki. Jeśli ponownie uzyskasz wynik dodatni, powinnaś udać się do lekarza, aby to potwierdzić i dowiedzieć się, jak należy dalej postępować.

Co powinnam zrobić, gdy po wykonaniu dwóch testów ciążowych otrzymam wynik niejednoznaczny?
Jeśli po przeprowadzeniu dwóch testów ciążowych uzyskasz wynik niejednoznaczny, powinnaś skonsultować się z lekarzem.

Data ostatniej weryfikacji ulotki: 22.06.2022
wersja 3AT

OBJAŚNIENIE SYMBOLI

	Przed wykonaniem badania zapoznać się dokładnie z instrukcją		Tylko do diagnostyki in vitro
	Do jednorazowego użycia		Przechowywać w temperaturze 2-30°C
	Numer serii		Data ważności

CE 1434

Wytwórca:
Hydrex Diagnostics Sp. z o.o.
ul. Al. Stanów Zjednoczonych 61A
04-028 Warszawa
www.hydrex.pl

YouTube
Zobacz jak wykonać test oraz interpretować wyniki na:
www.youtube.com/domowelaboratorium

INFOLINIA
801 000 977
 domowe laboratorium
OD 1987 ROKU